
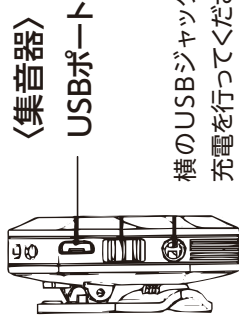


# 骨伝導集音ヘッドホン(ワイヤレス)



## bonein™ BN-702T 使用説明書 (BN-702TN共通)

### 充電方法

ヘッドホン、集音機の充電がされている事を確認してください。  
お届けしたばかりの702Tは仮充電しかされていない為、試し運転か運転不可の場合が多いです。  
付属のUSBケーブルを使い(アダプターは付属しておりません。USBケーブルの付属は一本です)二つとも満充電(約3時間)することをお勧めします。


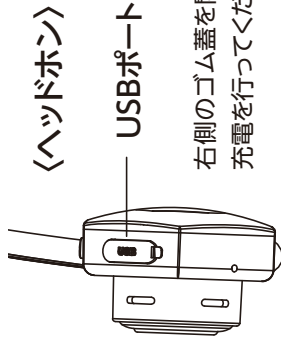


### 電源のオン・オフ

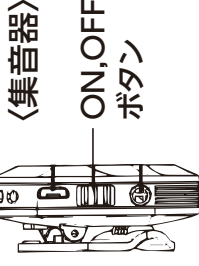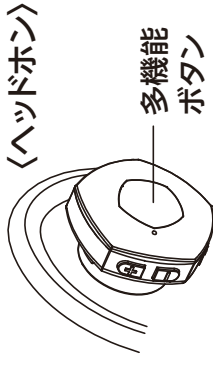

### 充電確認方法


〈ヘッドホン〉 右側(再生、一時停止ボタン表示がある側)「※1以下多機能ボタン」のボタンを3秒押すとヘッドホンの電源が入ります。  
中央に小さなランプ表示箇所が光らない場合(または女性のアナウンスで「パワーオン」と言わない場合)は充電されていません。または、ランプ表示が赤点減している場合は低充電状態です。

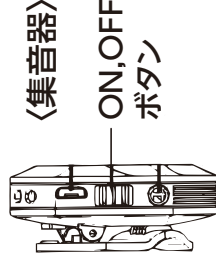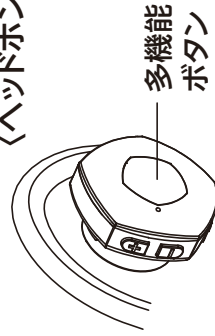

横のON,OFFボタンをONにしても縦端にあるランプが光らない場合は充電されていません。または、ランプ表示が赤点減している場合は低充電状態です。

### ヘッドホンに接続する機器を登録する

ヘッドホンに繋げたい機器を登録するには、ヘッドホンのBluetooth電波を繋げたい機器が受信する必要があります。

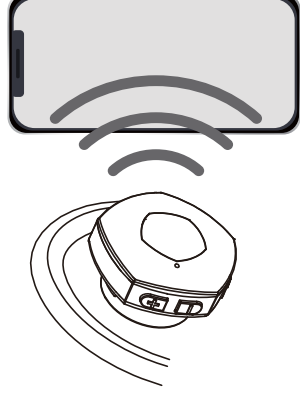

ヘッドホンの電源をONにした状態で繋げたい機器(スマートフォン等)でBluetooth電波検索を行うと「BN702」という項目が出てきますので、ヘッドホンの登録を行ってください。

検索できる返時間がかかる場合があります


登録が完了するとヘッドホンから女性の声で「コネクティング」というアナウンスがながれます。  
お好きな音楽や音をお楽しみください。

接続が解除されると「ディスコネクティング」というアナウンスが流れます

## 機器を登録後のヘッドホン使用方法 1

機器とペアリングが完了したヘッドホンは基本的に機器の音はヘッドホンから流れます。


〈スマートフォン〉

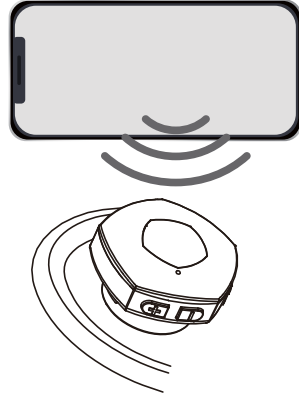

- **着信があった場合**  
多機能ボタンを一度押すと通話ができます。  
長押しすると着信拒否できます。  
通話後、再度ボタンを押すと通話が終了します。
- **直近の通話の電話番号に電話をかける**  
多機能ボタンをダブルクリックすると直近の通話履歴の電話番号に電話をかけられます。  
ライン電話を含むその他の通話も可能です。


## 機器を登録後のヘッドホン使用方法 2

〈音楽〉

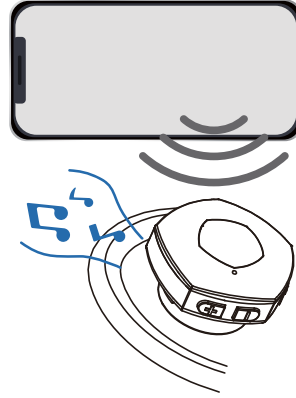

- ペアリング後の機器(スマートフォン等)から音楽を流すことで、702Tのヘッドホンから音が出ます。
- **音楽の再生と一時停止**  
多機能ボタンを一度押すことで再生と一時停止が可能です。
  - **音量の調節**  
多機能ボタン後ろ側の「+」「-」ボタンで音の調整が可能です。
  - **次の曲への飛ばし方と巻き戻し方**  
「+」ボタン長押しで次の曲に飛ばせ、「-」ボタン長押しで巻き戻しができます。

## ヘッドホンと集音器を接続する

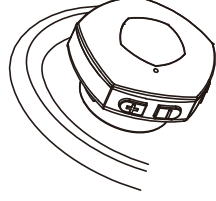


ヘッドホンへの登録用ボタン

ヘッドホンと集音機の両方の電源を入れ、集音機の横のOボタン※2を押すと登録が開始されます。


電波検索中はランプ表示が青で点滅します

### ヘッドホンとペアリングが出来る機器は1台です

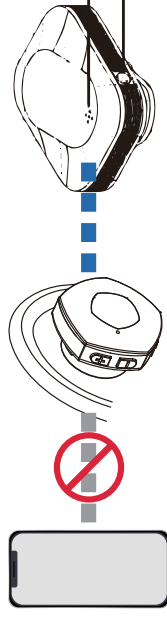

スマートフォンや他の機器と接続している場合は解除してから集音機との接続を行ってください。


## 集音機を接続後の使用方法

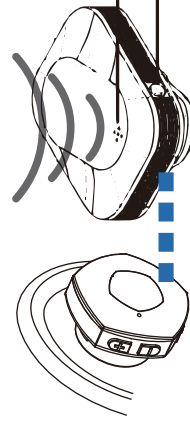

集音機との接続が完了した場合、集音機が拾う音(ロゴ部分の十字O部分から集音)をヘッドホンに伝えます。

使用状況により距離、聞こえ方は変わってきます

また、テレビ、ラジオ、スピーカー等のイヤホンジャックから付属のケーブルを使って集音機に直接つなげることで、ヘッドホンに音を直接飛ばすことができます。

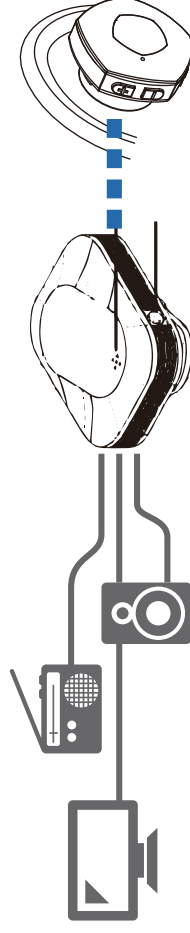

ヘッドホンが他の機器と接続を行うと自動的に集音機とのペアリングは解除されます