

# 骨伝導有線集音器 BN-802

## ユーザーマニュアル


骨伝導有線集音器 BN-802 をお選びいただきありがとうございます。  
骨伝導とデジタル変換技術で新しいリスニングの世界をお楽しみください。  
本製品を使用される前にユーザーマニュアルをよくお読みになり、正しくお使いください。

### 1. 製品紹介

BN-802 はヘッドホン型の骨伝導有線集音器です。その設計には、骨伝導とデジタル変換技術の両方が含まれており、聴覚神経が損なわれていない難聴の方であれば様々な年齢層の方にご使用いただけます。

- 左右の耳の聞こえのバランスを調整できます。
- 付属のオーディオケーブルを使用して携帯電話、テレビ、ラジオ、パソコンなど、さまざまな電子機器に接続できます。

### 2. 各部名称

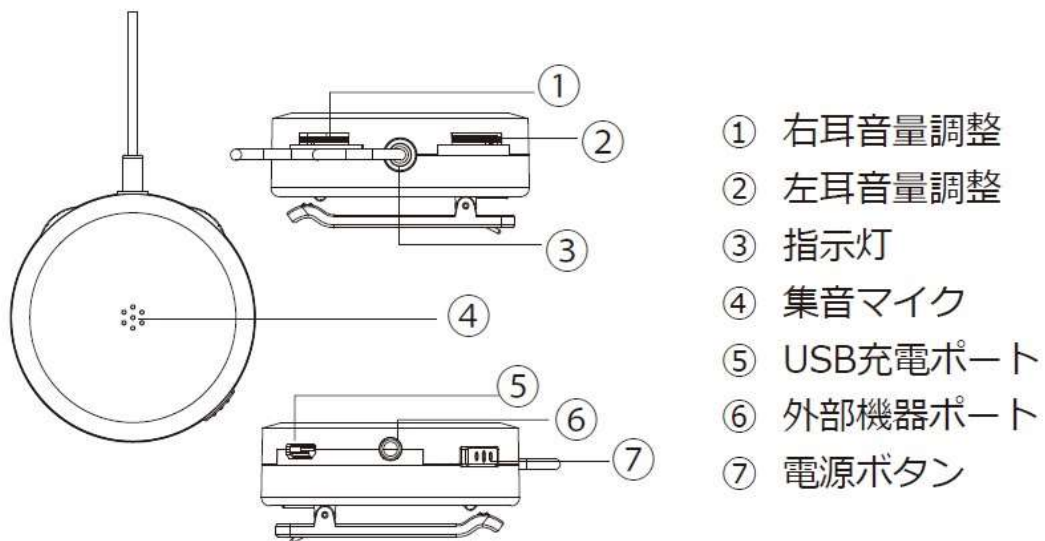

### 3. 製品内容

ヘッドホン（集音器）本体	1 個
マイクロ USB ケーブル	1 本
オーディオケーブル	1 本
ユーザーマニュアル	1 冊

### 4. ヘッドホンを装着する

ヘッドホンを自然に耳に掛けます。耳を覆わないように、イヤerpッドを耳の横の骨の部分にあててください。（下図参照）

集音器は襟元などにクリップで留めることができます。



### 5. 操作方法

- 上の図のようにヘッドホンを装着してください。
- 音量が最小に設定されているのを確認し、電源を入れます。
- 両耳の音量をそれぞれ聞こえやすい大きさに調整します。
- 周波数ボタンを押し、最適な周波数モードを選択します。
- 他の電子機器と接続したい場合は、付属のオーディオケーブルを使用してください。

**注意：**

- ※ 音量を最小にしても完全に聞こえなくなるわけではありません。
- ※ 他の電子機器が接続されている時は、集音器の集音機能は自動的にオフになり、電子機器からの音をヘッドホンに送ります。

## 6. LED ランプの説明

色	状態
赤と青（3 秒点滅）	電源オン
青（点灯）	作動中
赤（点滅）	低電力
赤（点灯）	充電中（赤く点灯し数分後に消灯）

## 7. 充電の仕方

- 付属の充電ケーブルを使用して、ヘッドホンを充電します。充電ケーブルを集音器の USB 充電ポートに差し込み、USB 側を USB ポートや USB コンセントに差し込んでください。（USB コンセントタップは付属していません。）5V/1A の電源アダプターで充電してください。
- 充電しながらヘッドホンを使用すると赤の LED ランプが点灯したままになります。
- 標準の充電時間は 3 時間です。バッテリーの寿命に影響を与える可能性があるため、24 時間以上充電しないでください。

## 8. 製品仕様

- 作動時間：最大 12 時間（音量による）
- 充電時間：3 時間
- 電池の種類：リチウムイオン電池 3.7V 350mAh
- 集音感度：-54±2dB
- 重量：35g（ヘッドホンの一部）；34g（集音器の一部）
- 周波数範囲：100Hz～18KHz
- スピーカータイプ：骨伝導スピーカー

## 9. トラブルシューティング

現象	考えられる原因	解決策
電源が入らない	充電が不十分	充電してください
音が再生できない	ほかの機器に接続中では ありませんか？	他の機器と接続されて ないか確認し、ケーブ ルを抜いてください
ハウリングがする	<ul style="list-style-type: none"> <li>・集音部分とヘッドホ ンの距離が近い</li> <li>・音量が最初から最大 になっている</li> </ul>	集音器とヘッドホン を離し、音量を最小に して電源を入れ、徐々 に大きくしてください

## 10. 保管とメンテナンス

- 初めて使用するときは、ヘッドホンを十分に充電してください。
- 乾燥した涼しいところで保管してください。
- 雨天・荒天時には屋外で使用しないでください。
- 長期間使用しなかった場合は、必ず充電してからご使用ください。
- お手入れの際はきれいな乾いた布でから拭きし、水洗いはしないでください。

## 11. 保証

- 保証期間はご購入日から 1 年間です。初期不良や自然故障の場合、ヘッドホンの修理を無料で行います。（使用後のアーム部分の折れは保証の対象外です。）
- 誤った使用方法や人為的な要因による損傷は保証の対象外です。
- 本製品を個人的に分解した場合、保証は自動的に無効になります。
- 修理が必要な場合は、販売店にご相談ください。

## 12. 警告と注意事項

- 本製品を分解したり、無理な圧力や殴打を加えたり、火の中に投げ込むなどは絶対に行わないでください。
- 本製品に異常な膨らみが見られた場合は、使用を止めてください。
- 本製品を高温環境に置かないでください。

